

Diversey™



# Oxivir Plus Spray

## Καθαριστικό Απολυμαντικό ευρέως φάσματος εφαρμογών

### Περιγραφή

Oxivir Plus Spray είναι ένα υγρό καθαριστικό απολυμαντικό, έτοιμο προς χρήση, για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των ανθεκτικών στο νερό σκληρών επιφανειών και των υφασμάτων.

### Βασικές ιδιότητες

- Αποτελεσματικό έναντι ενός ευρέως φάσματος μικροοργανισμών όπως βακτηρίδια, ιοί και μύκητες
- Όξινη σύνθεση με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου
- Με βάση την πατενταρισμένη τεχνολογία AHP
- Με μικρούς χρόνους επαφής
- Καθαρίζει αποτελεσματικά
- Χωρίς άρωμα

### Πλεονεκτήματα


- Εκτεταμένες δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και αποτελεσματικό έναντι ενός ευρέως φάσματος παθογόνων που προκαλούν ανησυχία, όπως HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE and Norovirus
- Καθαρίζει και απολυμαίνει σε ένα βήμα, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, εμποδίζοντας την δημιουργία αλάτων
- Αφαλές για το χρήστη, χωρίς σήμανση επικινδυνότητας στις RTU συνθέσεις, καθώς δεν περιέχει ερεθιστικά συστατικά για το αναπνευστικό σύστημα
- Η πατενταρισμένη σύνθεση AHP είναι ήπια για τις επιφάνειες, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής τους
- Φίλικό προς το περιβάλλον. Τα ενεργά συστατικά του διασπώνται σε οξυγόνο και νερό
- Κατάλληλο για χρήση σε περιοχές υψηλού κινδύνου στους χώρους υγείας, σε δωμάτια ασθενών, σε ξενοδοχεία, δημόσια κτίρια και στη βιομηχανία τροφίμων

### Οδηγίες χρήσης

1. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα με ένα πανί.
2. Ψεκάστε το προϊόν απευθείας πάνω στην επιφάνεια.
3. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί.
4. Σημείωση: Για να απολυμάνετε την επιφάνεια από Norovirus, καθαρίστε προηγουμένως την επιφάνεια. Αφήστε την επιφάνεια υγρή για δύο λεπτά για να δράσει το προϊόν.

### Δοσολογία:

Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραιώση

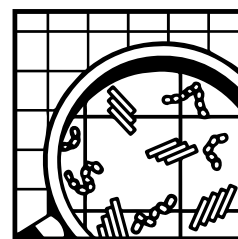

© A.I.S.E.

*\*Η παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.*



# Oxivir Plus Spray

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Διαυγές, κίτρινο υγρό

pH (αδιάλυτο): pH (σε χρήση): 1.8

Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.000

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

## Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ([sds.diversey.com](https://sds.diversey.com)).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

## Συμβατότητα προϊόντος

**Σημαντικό:** Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ευαίσθητες σε οξέα επιφάνειες. Κάτω από τις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης, το Diversey Oxivir Plus Spray είναι κατάλληλο για χρήση στα περισσότερα υλικά που συναντώνται συνήθως.

## Μικροβιολογικά δεδομένα

Μικροβιολογικά δεδομένα. Αποτελεσματικό σύμφωνα με: EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 14476, EN13624 και EN13727

## Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοαποικοδομήσιμες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΕ για τα Απορρυπαντικά, EC 648/2004.

## Διαθέσιμες συσκευασίες

Το Diversey Oxivir Plus Spray είναι διαθέσιμο σε συσκευασία 6x0.675L.